

Rollenhalter austauschen - CR 7 Plus

Die folgenden Informationen sind eine Ergänzung zur Montage- und Gebrauchsanweisung des Gerätes.

Grundsätzlich ist zusätzlich die Montage- und Gebrauchsanweisung des Gerätes zu beachten, in der wichtige Informationen wie z. B. Sicherheitshinweise, Aufstellung, elektrischer Anschluss, Desinfektion, Reinigung, etc. beschrieben sind.



Reparaturarbeiten, die über die übliche Wartung hinausgehen, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft oder unserem Kundendienst ausgeführt werden.



Vor Arbeiten am Gerät oder bei Gefahr spannungsfrei schalten (z. B. Netzstecker ziehen).

Lieferumfang


Folgende Artikel sind im Lieferumfang enthalten (Abweichungen durch länderspezifische Vorschriften und Einfuhrbestimmungen möglich):

Rollenhalter 2137-210-00E


- Rollenhalter (bestückt)
- 4 x Senkschraube M3x10

Benötigte Werkzeuge


- Innensechskantschlüssel SW 2,5
- Kreuzschlitzschraubendreher PH1

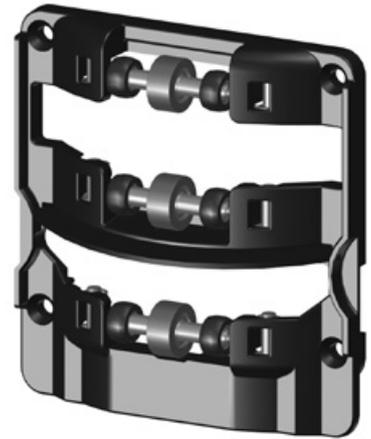


1.

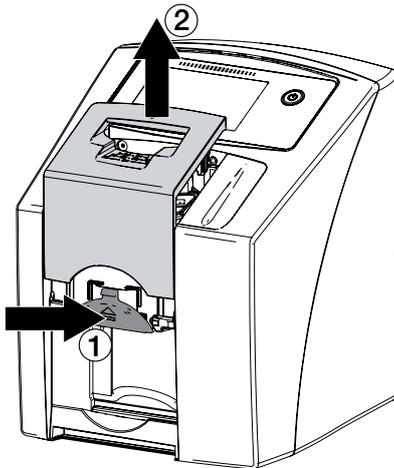


2.

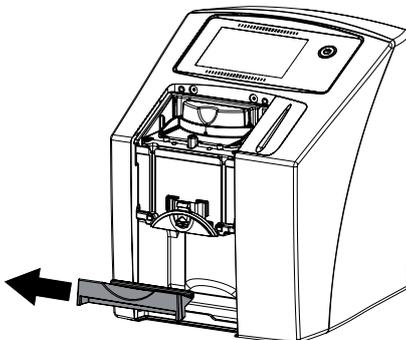


3.

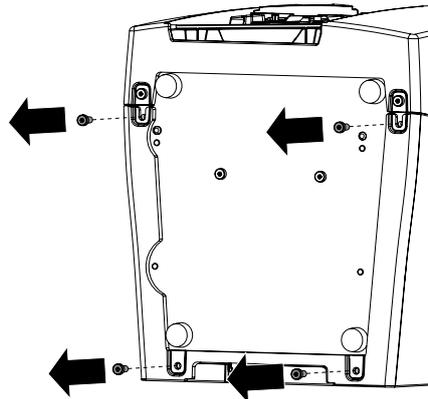


4.

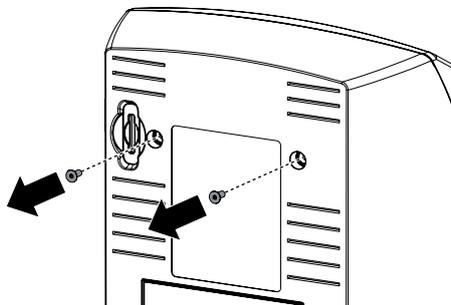


5.

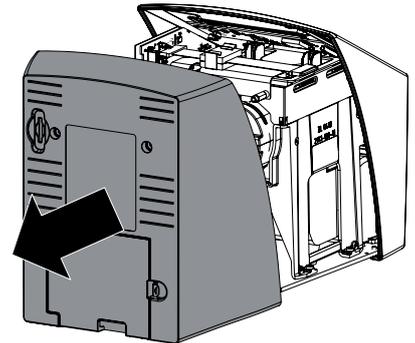


6.

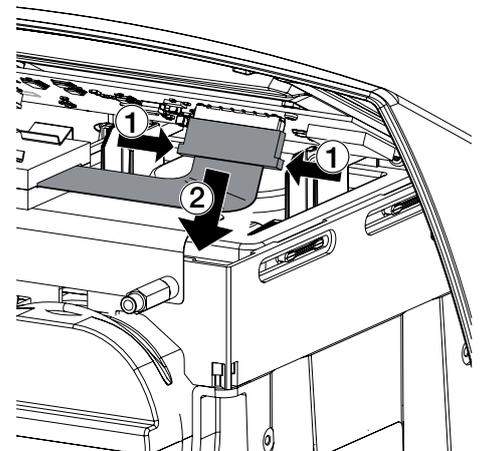


7.

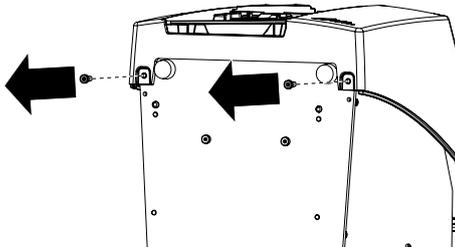


8.

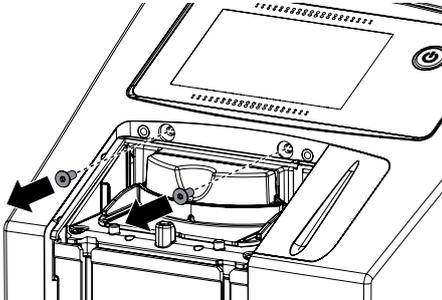


9.

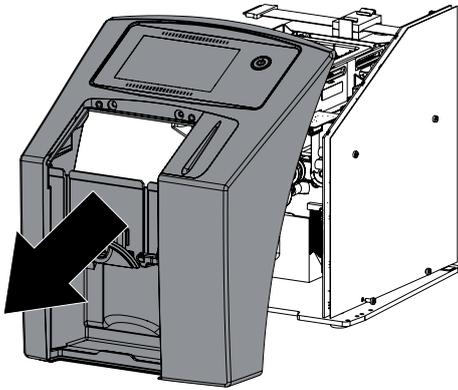


10.

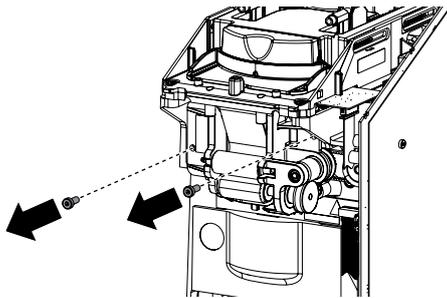


11.

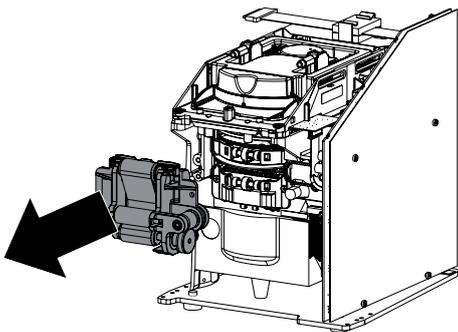


12.

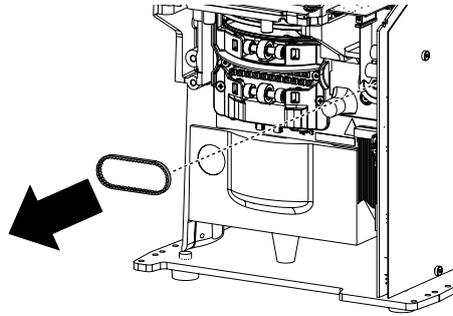

13.

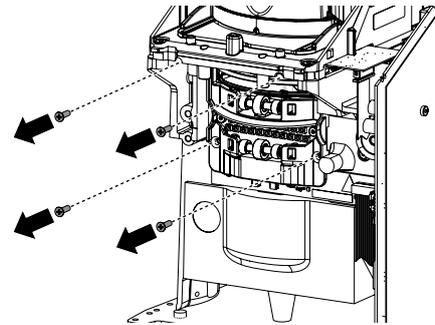

14.

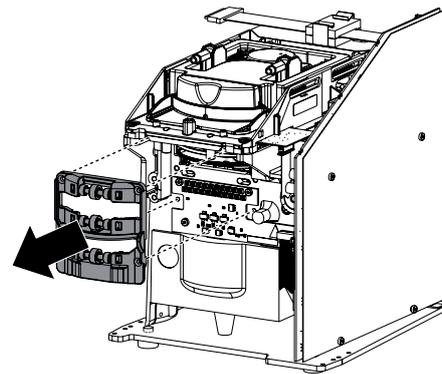

15.

- Das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Prüfungen

Initialisierung überwachen

1.

- Gerät einschalten.

2.

- Initialisierung überwachen (Display funktioniert, alle Teile bewegen sich einwandfrei, Antriebe laufen einwandfrei, Löscheinheit leuchtet).

Es dürfen keine geräteunspezifischen Geräusche oder Anzeigen auftreten.

Funktion der Komponenten

1.

- Speicherfolie mit einem beliebigen Objekt (z. B. Schlüssel) belichten.

2.

- Speicherfolie bei eingeschalteter Löschung auslesen.

3.

- Das ausgelesene Röntgenbild löschen.

4.

- Gleiche Speicherfolie homogen belichten und erneut auslesen.

Es dürfen keine Artefakte oder Unregelmäßigkeiten (z. B. Geisterbilder, Schatten) vorhanden sein.